

2. 装用スケジュール

- (1) このレンズは終日装用、1日使い捨てレンズです。レンズは起きている間に装用し、寝る前にははずして捨てて下さい。
- (2) レンズの装用に慣れるまでのスケジュールは個人差があります。必ず眼科医の指示に従って、あなたにもっとも合ったスケジュールで慣らしてください。

【スケジュール例】

装用日数	1日目	2日目	3日目	4~6日目	7日目以降
装用時間	4~6時間	6~8時間	8~10時間	10~12時間	12~14時間

(3) 装用を中断した場合

- ・1週間未満の場合は普段通りの装用が可能です。
- ・1週間以上中断した場合は、はじめて装用する場合と同じように上記の表を参考に開始してください。
- ・1ヶ月以上中断した場合は、眼科を受診してから装用を開始してください。

3. 定期検査

レンズ装用開始日から1週間後、1ヵ月後、3ヵ月後、以降3ヵ月毎に、又は眼科医の指示に従って必ず定期検査を受けて下さい。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- (1) レンズを使用する前に必ず添付文書をよく読み、必要なときに読めるよう保管して下さい。
- (2) アレルギー疾患(金属アレルギー等素材に対するアレルギーを含む)を有する場合は、有害事象が発生する危険性が高まりますので眼科医に相談してください。

2. 不具合・有害事象

以下の不具合や有害事象が発生する可能性があります。

(1) 不具合

レンズ：破れ、キズ、変形、変色

保存液及び容器：液漏れ、液の変色・変質、破損、汚れ

(2) 有害事象

角膜潰瘍、角膜膿瘍、角膜穿孔、角膜浸潤、角膜びらん、角膜炎、角膜上皮スティニング等の角膜上皮障害、角膜浮腫、角膜血管新生、結膜炎、結膜下出血、虹彩炎、麦粒腫、マイポーム線炎、霰粒腫、眼瞼下垂、調節性眼精疲労、ドライアイ、角膜内皮細胞の減少

<装用時の症状と対処方法>

- ・眼の調子や体調が悪い場合は、無理に使用しないで下さい。
- ・レンズの使用中、次のような症状が発生した場合は対処方法をお試しください。
症状が続く場合には速やかに眼科を受診してください。

症状	対処方法
異物感、痛み、かゆみ、くもり、眼ヤニが多く出る、充血	・レンズを確認し、キズや破損がある場合は、新しいレンズに交換する。 ・装用時間が長すぎる場合は、装用時間を短縮する。
視力不安定、見えにくい、眼の疲れ	・レンズの左右、裏表を確認し、新しいレンズに交換する。 ・装用時間が長すぎる場合は、装用時間を短縮する。
乾燥感	・数回まばたきをして涙を多く出す。 ・ソフトコンタクトレンズ用の目薬を点眼する。

3. 高齢者への適用

高齢者や自分でレンズの装着脱が困難な場合は、眼科医に相談し、適切な指導を受けて下さい。

4. 妊婦、産婦、授乳婦及び小児等への適用

- (1) 薬剤の服用や点眼が必要な方、妊娠、出産された方は、レンズの装用に影響を及ぼすことがありますので、眼科医に相談してください。
- (2) 小児にレンズを使用させる場合は、保護者の方等による指導監督のもとに使用してください。

5. その他の注意

- (1) レンズ紛失時及び装用中止時の対応として、予備レンズを携帯し、眼鏡と併用してください。
- (2) 化粧はレンズをはめてから、化粧落としはレンズをはずしてから行ってください。
- (3) 化粧品等がレンズにつかないようにしてください。
- (4) 装用中に使用する目薬は、防腐剤を含まないソフトコンタクトレンズ用の人工涙液をおすすめします。それ以外の目薬は眼科医の指示を受けて使用してください。
- (5) 水泳の際はレンズをはずしてください。
- (6) 本品の環状着色部分によって光の量が減少し、見えにくくなる事があります。また、人によっては視野周辺部に違和感を感じる事があります。装用開始後1週間を経過しても軽減しない場合は、眼科医に相談してください。
- (7) 本品の環状着色部分によって、周囲が暗い場所や夜間は見えにくい場合がありますので、ご注意ください。
- (8) 本品は、極度に乾燥した環境(空調のきいた車内・室内等)や激しいスポーツなどによりレンズがずれて環状着色部分が視界の一部を妨げたり、レンズがはずれたりする場合があります。車の運転中や機械類の操作中にレンズがずれたり、はずれたりした場合は、速やかに周囲の安全を確認し、運転や操作を中止してください。
- (9) 海外に長期滞在する場合は、現地の医療機関で定期検査を受けて下さい。

【保管方法及び有効期間等】

- (1) 保管方法：直射日光及び凍結を避け、室温で保管してください。
- (2) 使用期限：レンズの使用期限は、レンズの外箱と容器本体に記載されています。使用期限を過ぎたレンズは使用しないでください。
例：2025/12の場合は、2025年12月末日まで

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

<製造販売業者>

フロムアイズ株式会社 東京都千代田区神田多町二丁目7番地 大橋ビル

<製造業者>

*ビジョンフォーカス社／VIZIONFOCUS INC. 台湾

<製品に関するお問い合わせ>

製品の品質には万全を期しておりますが、万一レンズや包装容器に異常を発見した場合には使用せず、眼科医・購入先に相談してください。
または、下記の弊社フリーダイヤルにお問い合わせください。

フリーダイヤル 0120-224-552
オペレーター受付時間 9:30~17:30(土日・祝日除く)

包装に記載されているマーク

マーク	解説
PWRもしくはD	頂点屈折力(レンズ度数)
BC	ベースカーブ
DIA	直径
LOT	製造番号
EXP	使用期限
	高压蒸気滅菌済
	容器包装識別表示：紙
	容器包装識別表示：プラスチック